

BIOLIMP

DESINFETANTE HOSPITALAR PARA  
SUPERFÍCIE FIXA E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS

# HIPOCLORITO



BIOLIMP

DESINFETANTE HOSPITALAR  
PARA SUPERFÍCIE FIXA E  
ARTIGOS NÃO CRÍTICOS

## HIPOCLORITO

**FINALIDADE:** Limpar e desinfetar superfícies fixas e artigos não críticos.  
**PROPRIEDADES:** Este produto desinfeta superfícies fixas e artigos não críticos.  
**MODO DE USAR:** Utilizar a solução de hipoclorito de sódio para desinfetar superfícies fixas e artigos não críticos.  
**PRECAUÇÕES:** Evitar contato com superfícies sensíveis e evitar a ingestão.  
**ARMAZENAMENTO:** Armazenar em local fresco e seco, longe de fontes de calor e luz solar direta.

BIOLIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME/MS  
R. São João, 100 - Jd. São João - CEP: 05001-000 - São Paulo, SP  
CNPJ: 06.662.774/0001-00 - Insc. Est. Ind. 06.088.811 - Indústria Brasileira  
www.biolimps.ind.br



(67) 3425-3920

CVT004 - 0871 1306 8833

LOTE: 1/18  
FABR: 02/2021  
VALIDADEZ: 2 ANOS  
Produto Não-Polêmico 04/12  
ANVISA-MS Nº 341 132008 9 792001 379624



LINHA HOSPITALAR

5L

Imagens meramente ilustrativas.

## LINHA HOSPITALAR

# BIOLIMP



DESINFETANTE HOSPITALAR PARA  
SUPERFÍCIE FIXA E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS

## HIPOCLORITO

### DESCRIÇÃO:

HIPOCLORITO é um produto líquido incolor a levemente amarelado, de pH alcalino.

Possui ótimo poder bactericida e fungicida, sendo eficaz frente às cepas Salmonella Choleraesuis, Staphylococcus Aureus e Pseudomonas Aeruginosa. Não espuma e é facilmente removido nos enxágues.

### INDICAÇÕES DE USO:

- ✓ Desinfecção de superfícies fixas, pisos, paredes, bancadas não metálicas de hospitais e estabelecimentos de atendimento à saúde. Recomendado para artigos plásticos e borracha, como máscaras de inalação, nebulizadores, banheiras infantis e outros

### INSTRUÇÕES DE USO:

#### Para limpeza comum:

- 1 Aplique o produto puro com auxílio de panos ou esfregões sobre a área a ser tratado e deixe em contato por 10 minutos.

- ⚠ Não enxague.

### VARIAÇÕES DO PRODUTO

- A** Hipoclorito 1%      **B** Hipoclorito 2,5%

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

				
<b>A</b>	-	5Kg (x4 un.)	-	-
<b>B</b>	-	5Kg (x4 un.)	-	-

### ORIENTAÇÕES DE MANUSEIO

-  Evitar contato direto com o produto
-  Evitar a inalação do produto
-  Lavar e secar as mãos após o manuseio
-  Recomenda-se a utilização de E.P.I.'s durante a preparação e aplicação da solução (luvas, máscara, óculos, botas emborrachadas e avental vinílico).

### ORIENTAÇÕES DE ARMAZENAMENTO

-  Manter em local fresco e arejado